

末血検体・凝固系検体

採血時

のおねがい


末血




EDTA-2K
(粉末)



黒い線のところまで
2ml 採血

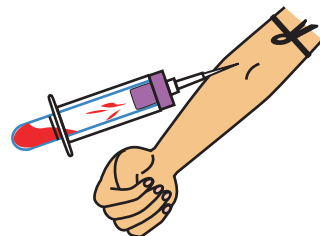

転倒混和
(5回以上)

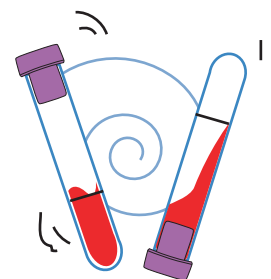


検査センターへ



採血開始から転倒混和まで凝固防止のため速やかに行ないます。


凝固系

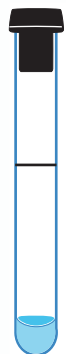


クエン酸Na (液体)
5.0ml 容器
(2.0ml 容器)



黒い線のところまで
5.0ml 容器は4.5ml 採血
2.0ml 容器は1.8ml 採血

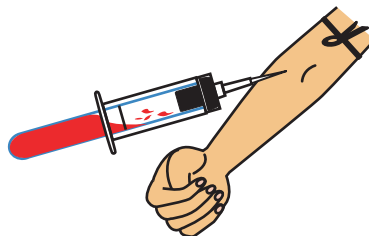

転倒混和
(5回以上)

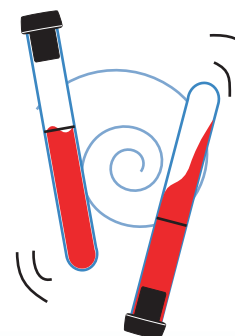

検査センターへ



クエン酸:血液 = 1:9 になります